



Blutausstriche anfertigen – Kurzanleitung

Blutausstriche können leicht selbst angefertigt und untersucht werden. Bei Verdacht auf Blutparasiten oder zur Differenzierung der Blutzellen nach entsprechender Färbung bringen Blutausstriche schnell Gewissheit.


- 1** Blut auf den Objektträger tropfen lassen. Zweiten Objektträger im 45°-Winkel „rückwärts“ in den Blutropfen ziehen.

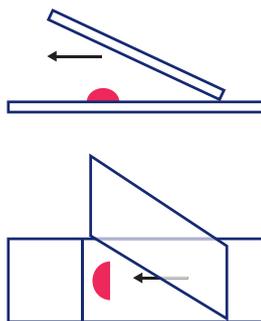

- 2** Den zweiten Objektträger jetzt im 45°-Winkel über den abgelegten Objektträger „vorwärts“ schieben, sodass der Blutropfen verteilt wird.

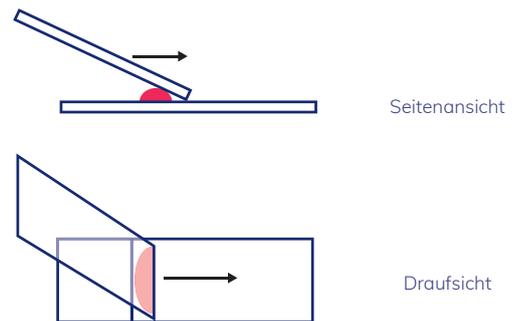

- 3** Der Ausstrich – auch Fahne genannt – sollte am Ausgangspunkt am dunkelsten und am Endpunkt am transparentesten erscheinen.

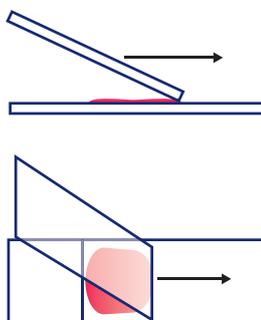

- 4** Blutausstrich trocknen lassen. Sobald er vollkommen trocken ist, kann der Ausstrich mit unterschiedlichen Methoden angefärbt werden.

